



firstkind
living science

- > Resultados en 15 minutos
- > Sensibilidad de 97,1%
- > Especificidad de 99,3%
- > Tubos precargados de reactivo monodosis



'FlowflexTM. SARS-COV-2

Prueba rápida de antígeno

Proporciona ayuda en el diagnóstico de la infección por SARS-COV-2 a personas sospechosas de tener una infección activa por COVID-19.



RÁPIDO



SIMPLE



PRECISO

ACON[®]
ACON Laboratories, INC.

Flowflex SARS-CoV-2 Prueba rápida de Antígeno

La prueba rápida de Antígeno Flowflex SARS-CoV-2 es una prueba inmunocromatográfica para la detección cualitativa del antígeno de la proteína nucleocápsida del SARS-CoV-2, en muestras de hisopos nasofaríngeos (NP) de individuos sospechosos por COVID-19.

- Muestra de hisopo nasofaríngeo
- Resultados en 15 minutos
- Excelente desempeño en comparación con los métodos moleculares.
- Sensibilidad de 97,1%. Especificidad de 99,3%
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Caducidad 2 años
- Tubos precargados de reactivo monodosis

Validación Clínica

La validación clínica de la eficacia de la prueba rápida de Antígeno Flowflex se ha llevado a cabo a base de un estudio de 304 muestras de hisopos nasofaríngeos de pacientes sospechosos por COVID-19 en los últimos 7 días. Todos los resultados obtenidos de la prueba rápida de Antígeno Flowflex SARS-CoV-2 se han correlacionado con los resultados del RT PCR.

Fiabilidad clínica de Flowflex SARS-CoV-2


Método	Resultado	RT-PCR		Total
		Negativo	Positivo	
Flowflex SARS-CoV-2	Negativo	269	1	270
	Positivo	1	33	34
Total		270	34	304
PEP: 97.1% (83.8% - 99.9%)*		PEN: 99.6% (97.7% - 99.9%)*		PG: 99.3% (97.5% - 99.9%)*

PEP- Prueba de ensayo positivo; PEN – Prueba de ensayo Negativo; PG – Porcentaje General, *95% Fiabilidad

Componentes de la caja

- 25 Cassettes de Prueba
- 25 tubos precargados de reactivo
- 1 Hisopo de control negativo
- 25 bastoncillos de algodón desechables
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Hisopo de control positivo
- 1 estación de trabajo

Preparación de Muestra e Interpretación de Resultados

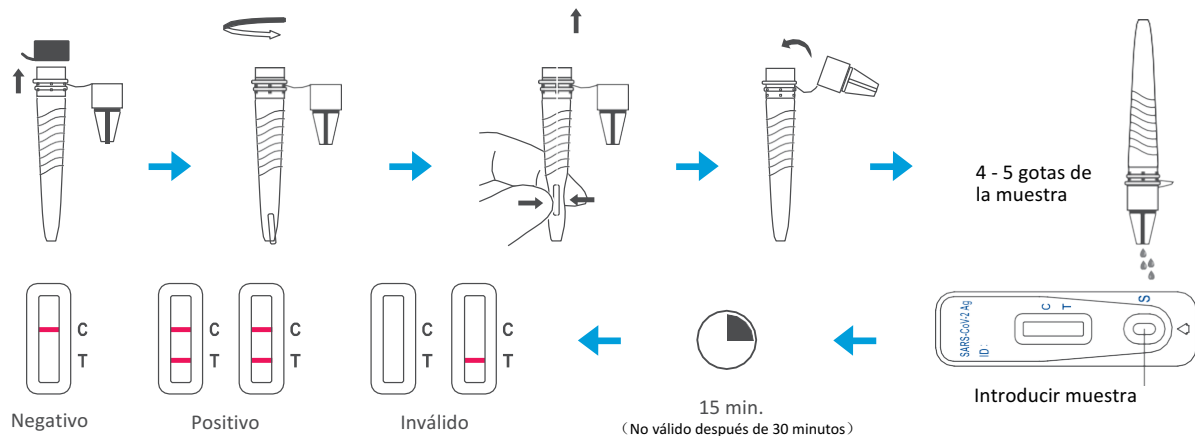

Información

Nombre de producto	Código de producto	Formato	Tipo de muestra	Embalaje
Flowflex SARS-CoV-2 prueba rápida de Antígeno	L031-11815	Casete	Hisopo nasofaríngeo	Caja de 25 Kits



firstkind
living science

Fristkind Latam SLU
Felipe Menéndez 2, 2o A
33206 Gijón, Asturias
comercial@firstkindlatam.com

ACON Laboratories, Inc.
Oberlin Drive, # 340
San Diego, CA 92121, USA
aconlabs.com