

# PRUEBA RAPIDA DETECCION ANTIGENO SARS COV-2



## **¿Qué detecta?**

*La prueba rápida ANTIGENO busca proteínas de la membrana del virus SARS CoV-2.*

*Igual que la PCR, la prueba de antígeno AMP detecta directamente material del coronavirus SARS-CoV-2. Así, indica si una persona es portadora del virus ahora y es potencialmente contagiosa.*

## **¿Qué es la prueba rápida de antígeno?**

El Test Rápido del Antígeno SARS-CoV AMP es una prueba inmunocromatográfica rápida para la detección cualitativa del antígeno proteico de la nucleocápsida del SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas humanas como ayuda en el diagnóstico rápido y eficiente de la Enfermedad por Corona Virus 2019 (COVID-19).

## **¿Cuánto tardan los resultados?**

La prueba rápida de antígeno está dirigida a profesionales sanitarios, no obstante, es fácil de usar y no requiere ningún entorno de laboratorio.

El resultado se obtiene en sólo 15 minutos por ello es una herramienta valiosa para una detección precoz eficiente de infección por SARS-CoV-2.


# ¿Cómo se realiza?

- Insertar el hisopo en la fosa nasal del paciente hasta alcanzar la superficie nasofaríngea posterior (donde está presente la mayor parte de la secreción).
- Frotar girando varias veces el hisopo.



- Colocar el hisopo en el tubo junto con 4 gotas de buffer.
- La solución final verterla sobre el casete.
- En 15 minutos se verá el resultado.

## Sensibilidad y especificidad Rendimiento comparado con la RT-PCR

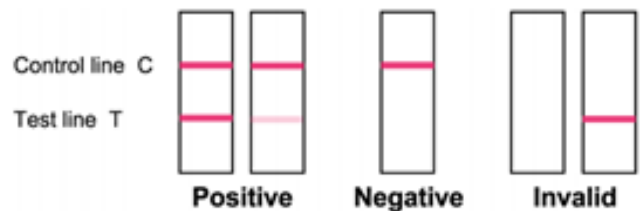

- Sensibilidad: 86.7% (95% CI: 73.2% - 95.0%)
- Especificidad: 100.0% (95% CI: 96.9% - 100%)
- Concordancia: 95.0% (95% CI: 91.0% - 97.5%)
- Interferencias: No se detectaron interferencias para sangre con EDTA, medicamentos antivirales, antibióticos, medicamentos antibacterianos, aerosoles nasales, gotas nasales, corticosteroides nasales.

## Composición del kit

- 25 Casetes envasados individualmente en un sobre sellado.
- 25 Hisopos estériles
- 1 Buffer de extracción
- 25 Tubos de extracción y pipetas.
- 1 Soporte de tubos



 Made in Austria

Pedidos:  
Pilar Funes  
pfunes@eugenomic.com  
630 04 46 22